


# InLab 取扱説明書

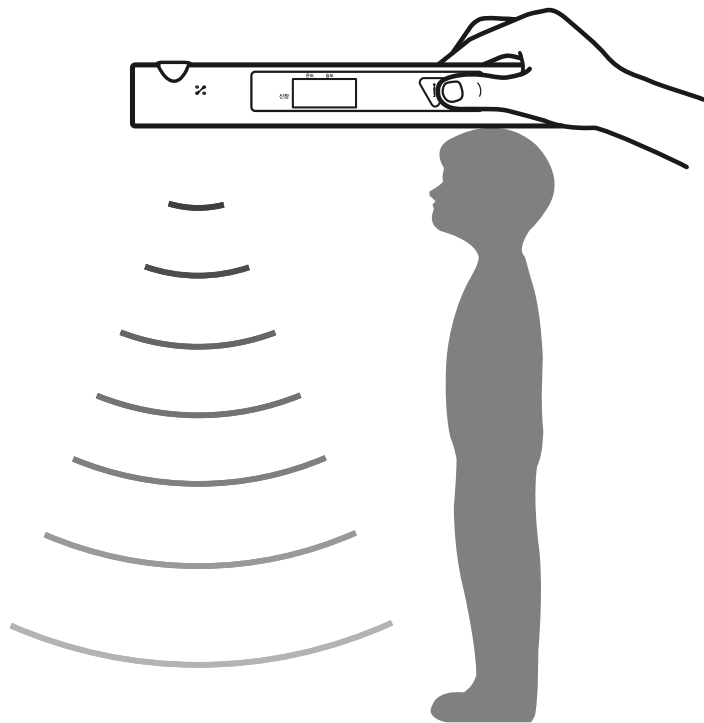


- ・ 本製品は、超音波を使用して簡単に身長を測定できる機器です。
- ・ 本製品を使用する前に、「取扱説明書」を必ずお読みください。

## 1. 製品構成


InLabの製品構成は次のとおりです。各構成部品が全て揃っているか確認してください。

- ① InLab
- ② 電池 - 単4形(1.5V)× 4個
- ③ 取扱説明書

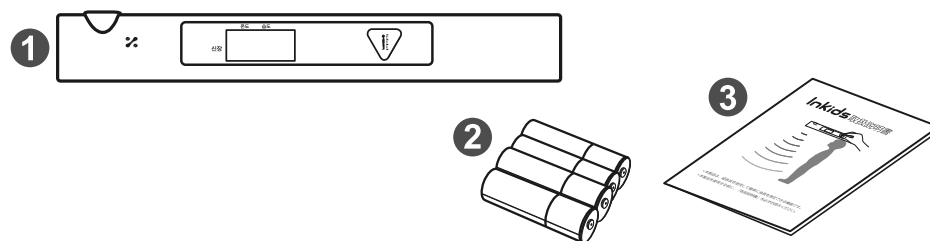

## 2. 外観及び名称

各部品の名称は次のとおりです。

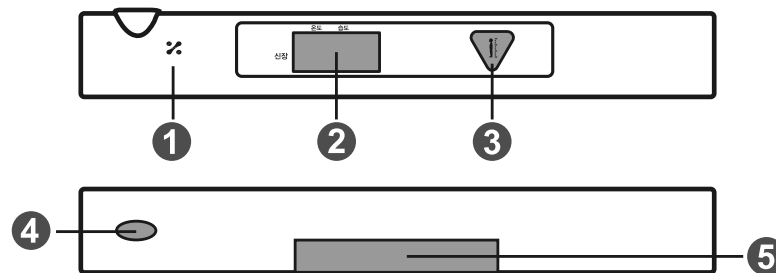


- ① 気温センサー
- ② LCD画面
- ③ ボタン
- ④ 身長測定部(超音波センサー)
- ⑤ 電池カバー



## 4. エラーメッセージ

状況に応じて以下のエラーメッセージがLCD画面に表示されます。

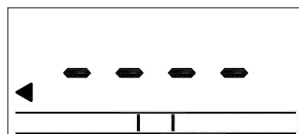

----  
水平に保たれていません。


\* エラーメッセージ表示後、水平を保つと「PUSH」が表示されます。



**E999**  
超音波信号の検出に失敗しました。地面にカーペットや布団もしくは何か超音波が反射されやすいものがないか確認してください。



**E000**  
超音波センサーが頭や手で隠れていないか確認してください。

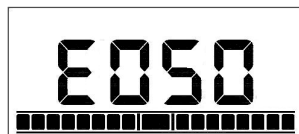

**E050**  
高さが50cmより低い場合は測定できません。近くに障害物がないか確認してください。




**E200**  
高さが200cmを超える場合は測定できません。



**bAtt**  
電池の残量が少ない場合、アイコンが表示されます。測定ができない場合は画面に「bAtt」と表示され、自動的に電源が切れます。

## 5. InLabアプリのダウンロード方法

InLabアプリを利用することで、簡単にお子様の成長を管理することができます。Google PlayストアまたはApp Storeへアクセスし、InLabアプリをダウンロードしてください。

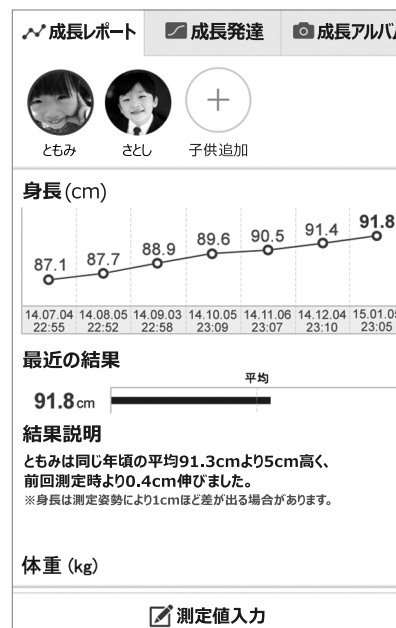

測定結果を入力してください。子供の成長が一目で分かります。


\* InLabアプリは性能向上のため、仕様・デザインは予告なしで変更される場合がありますのでご了承ください。

## 6. 使用時の注意事項

- 1) 製品を子どもの手の届かない場所に保管してください。製品を投げたり、落としたりすると、怪我や故障の原因になります。
- 2) 超音波センサーの部分を強く押ししたり、落としたりすると破損する可能性があります。
- 3) InLabを急に暑いところに持って行ったり、エアコンに近づけたりしないでください。超音波は周囲の温度に応じて速度が変わるため、温度が一定に維持されている場所で測定してください。
- 4) カーペットや布団の上で測定すると、超音波信号が反射されず、身長が正確に測定されない可能性があります。
- 5) 本製品の超音波信号は、約30度外側に広がる傾向があります。近くに超音波を反射するものがある場合、身長が正確に測定されません。
- 6) 製品を水に浸さないでください。
- 7) 水没したり、任意に製品を分解すると、保証対象外となります。
- 8) 保証期間はご購入日より1年間となります。また、使用者によって製品を破損した場合は、保証対象外となります。

## 7. 電池交換時の注意事項

- 1) 電池の極性(+/-)を確認し、正確に挿入してください。逆に挿入すると、液漏れや発熱、破裂の恐れがあります。

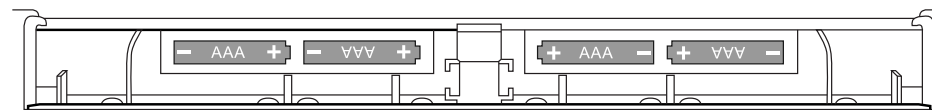

- 2) 新しい電池と古い電池を一緒に使用しないでください。交換時は4つの電池を全て同じメーカーの同じモデルにしてください。
- 3) 単四形のアルカリ電池、若しくはマンガン電池を使用してください。
- 4) 濡れた手で電池を交換しないでください。
- 5) 長期間使用しない場合、電池を本機から取り外して保管してください。
- 6) 使用済み電池は指定された方法で廃棄してください。
- 7) 電池を正しく使用しない場合、液漏れや発熱、破裂の可能性があり、本機の故障やけがの原因になります。

## 8. 製品仕様

測定項目	身長、温度、湿度
身長範囲	50 ~ 200cm
誤差範囲	± 1.0cm
その他測定範囲	温度 16 ~ 40°C(± 1°C) 湿度 30 ~ 80% (± 7%)
測定時間	1秒(最大7秒)
センサー	超音波、温度、湿度
使用電流	100mA以下
消費電力	DC 3V (1.5V 単4電池 ×4個)
表示画面	LCD
色	ブルー、グリーン、ピンク、グレー
装置寸法	43(W) × 44(L) × 300(H): mm
装置重量	238g
動作環境	16 ~ 40°C, 30 ~ 80%RH
保管環境	-10 ~ 70°C

\* 性能改良のため仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。

## 9. 製品保証書

(株)インボディ・ジャパンでは消費者基本法に基づき、下記の通り製品の保証を行っております。製品故障の場合は0120-900-369(フリーアクセス)までご連絡ください。

### 製品サービス基準

- ・保証期間内に製造上の欠陥または自然故障の場合、無償修理対象になります。
- ・修理又は交換の場合、製品に保存されているデータは消去されます。製品に保存されているデータは保証対象外です。
- ・保証書に明記されていない事項に関しましては、弊社の修理規定に準じて対応いたします。

保証内容	保証期間内	保証期間以降
ご購入後10日以内で正常な使用中の性能・機能上の欠陥により重要な修理が必要な場合	交換または払戻	有償修理
ご購入後1ヶ月以内で正常な使用中の性能・機能上の欠陥により重要な修理が必要な場合	交換または無償修理	

	保証内容	保証期間内	保証期間以降
修理可能	同じ欠陥による故障(3回まで)	無償修理	有償修理
	同じ欠陥による故障(4回目)	交換または払戻	
修理不可能	修理依頼1ヶ月以内の未引渡しの場合	交換または払戻	減価償却金額に10%加算して払戻
	修理用部品がない為、修理が不可能な場合	交換または払戻	



**注意**

製品を任意に分解、作動の無断変更、弊社以外での修理による製品内容の変更及び損傷の際には保証対象外となります。

## 10. 有償修理サービス

### 1. 過失による故障

- ・落下、浸水、衝撃、破損、無理な動作などによる故障及び損傷
- ・取扱説明書に記載されている使用方法と注意事項を従わなかったため発生した故障及び損傷

### 2. その他

- ・火災、地震その他の天災地変による故障及び損傷
- ・消耗部品が自然消耗により部品の交換が必要となった場合(バッテリー等)

<b>製品名</b>	ポータブル身長計	<b>型番</b>	InLabS50
<b>購入日</b>	年 月 日	<b>製品番号</b>	
<b>販売店</b>		<b>保証期間</b>	お買い上げから1年間

[部品保有期間(3年以内)] [部品保証期間:お買い上げより1年(ストラップは除く)]

- ・製品購入日が確認できない場合は製造年月より3ヶ月経過した日から品質保証期間を計算します。
- ・本保証書は日本国内においてのみ有効です。なお、再発行はできません。

### 株式会社インボディ・ジャパン

136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル

お客様お問い合わせ先: 0120-900-369

営業時間: 平日9:00~18:00(土・日・祝日は休み)

**Manufacturer/Country of Origin: InBody Co., Ltd./Korea**

Copyright©1996~by InBody Japan Inc.All rights reserved. IR-JPN-InLabM-181001