



InBody

再設定の方法について

データを連動するInBody Dialが変わると、アプリで製品を再設定する必要があります。
また、製品とのペアリングができない場合も、アプリの再設定を行うことで、殆どの問題が解決されます。再設定の手順は下記の通りです。

再設定の操作方法



1 InBodyアプリを起動し、環境設定を選択してください。

環境設定ボタン



3 機器接続を解除してください。

接続を解除しても、過去の測定データは削除されません。



4 機器の登録を選択し、InBody Dialを再選択します。



2 機器からInBody Dialを選択してください。



5 本体の電源を点けてからアプリの「設定」ボタンを押してください。
ペアリング設定完了後、右上に表示される「保存」を押すと設定完了です。



販売元：株式会社インボディ・ジャパン

カスタマーセンター Tel: 0120-900-369 (受付時間：平日9:00～18:00)

Mail: customer-support@inbody.co.jp