


InBody Application

—— いつでもスマホで測定結果を確認できるInBody無料アプリ ——

スマホで体成分を管理
測定結果が一目でわかる

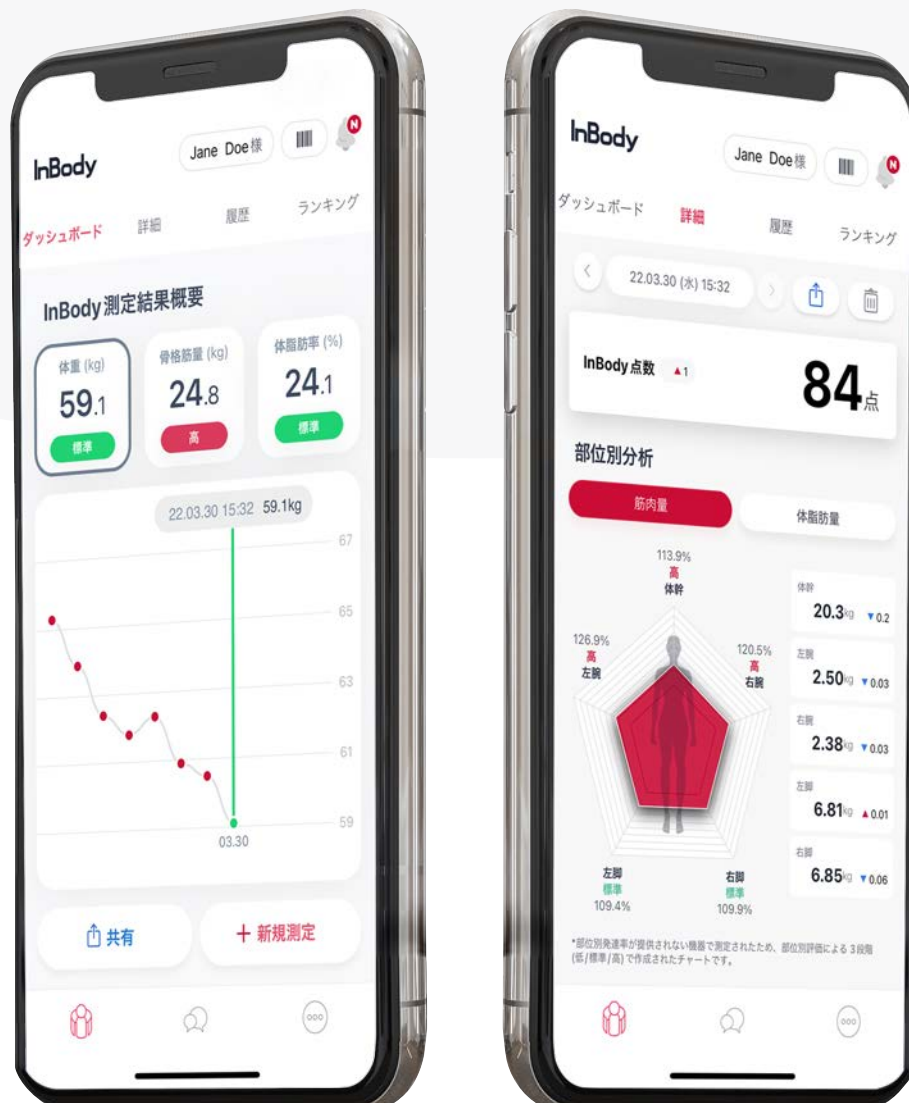

InBody


目標を設定する

測定結果からより詳しい解析や改善方法を提供
測定結果(概要) / 目標設定 / 栄養・運動ガイド




測定結果(概要)

体重・骨格筋量・体脂肪率を折れ線グラフで表示します。測定者の標準体重を基準に「低・標準・高」から発達程度を提供します。

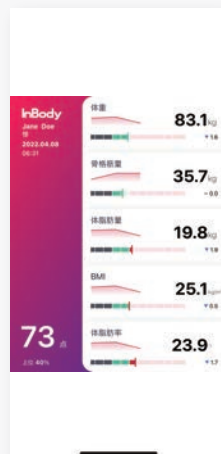

測定データの共有

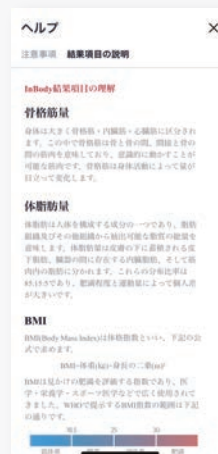


結果項目の説明



目標設定

運動期間や回数を入力して、自分に合った目標設定を作成できます。目標設定した骨格筋量と体脂肪量の達成率や、1日あたりの推奨エネルギー摂取量の詳細が確認できます。

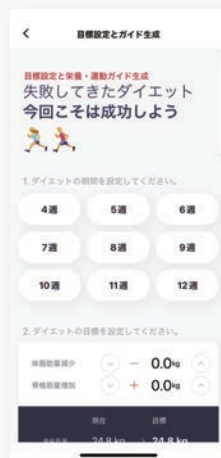

目標設定とガイド生成 1



目標設定とガイド生成 2



栄養・運動ガイド

設定した目標に基づいて、炭水化物・タンパク質・脂質の食事1回あたりの摂取目標量と食品の目安量を提供します。またYouTubeから運動に関連する動画を視聴できます。



栄養ガイド




運動ガイド

結果を確認する




項目毎の傾向や変化を分析

測定結果(詳細) / 体成分履歴 / ランキング

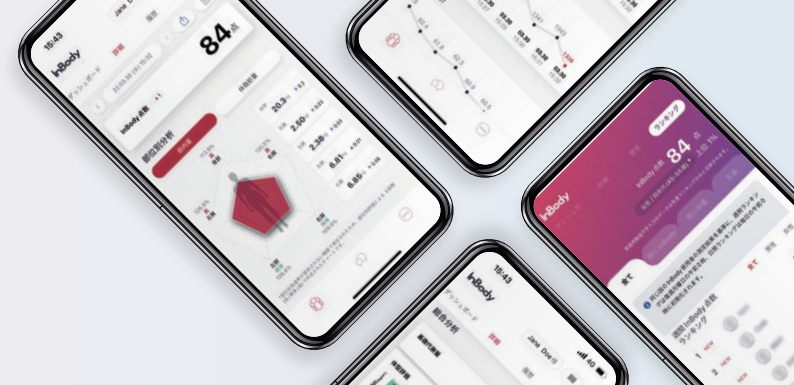

測定結果(詳細)

測定結果をチャートやグラフで表示します。InBodyの機種によって表示される項目数は異なりますが、部位別分析・筋肉・脂肪・CIDが共通で表示されます。

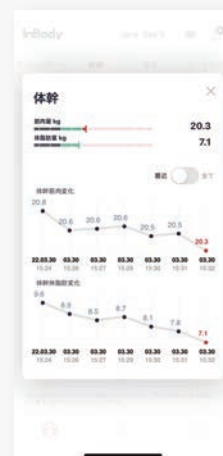

筋肉・脂肪 / CID

部位別分析(筋肉量・体脂肪量)

体成分履歴

測定結果を折れ線グラフで表示します。直近データは最大7件まで表示することができ、「全て」を選択すると、最初と最後に測定した結果のみ表示され、長期間の変化を確認できます。

折れ線グラフは期間を設定することで任意の期間の測定結果をグラフで確認できます。



体成分履歴(全て)

期間指定画面

ランキング

国内でInBody測定したデータを対象に、InBody点数と体脂肪率のランキングを週間・日間で提供します。また同じInBodyや体重など、条件を変えて表示することができます。

同じInBodyランキングの表示はLookinBody Webのアカウント作成が必要です。



同じInBodyランキング




同じ体重ランキング

測定結果を共有する

測定結果のアドバイスをより的確に


チャット機能 / 結果用紙確認

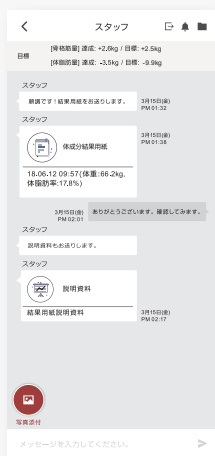

チャット機能

InBody アプリから測定者宛にチャットを送ることができます。測定結果を確認してアドバイスしたり、ファイル共有が簡単にできるため、コミュニケーション促進に役立ちます。

チャット機能のご利用はLookinBody Webのライセンス購入が必要です。

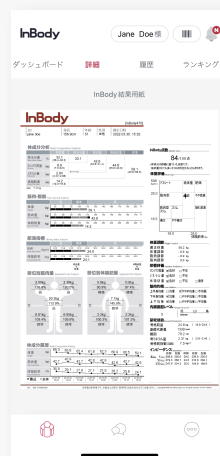

結果用紙

測定結果を専用結果用紙のレイアウトで閲覧することができます。用紙を印刷する手間が省け、紙の紛失を心配する必要もありません。

個人情報の修正はLookinBody Webのライセンス購入が必要です。

クラウドサービスのご案内

LookinBody Web

InBodyで測定した全てのデータを、ネットワーク経由で提供するクラウドサービスです。当サービスは30日間の無料体験版をご利用いただくことができますので、ライセンス購入前にお試しください。



【無料体験版ご利用前の確認事項】

1. 対応機種: InBody970・770・BWA・570・470・270 *1
2. 使用環境: InBodyを有線 LAN か Wi-Fi に接続できる環境 *2

*1 対応機種でも2019年7月以前に導入された機器はアップデートが必要です。近くの営業所にお問い合わせください。

*2 安定的な通信状態を維持するには有線 LAN をお勧めします。Wi-Fi は契約プランの仕様によって繋がらない場合があります。



LookinBody Web
接続ページ



InBodyアプリの
ダウンロードはこちらから

iOS版



Android版



< 互換性 > ○ iPhone: iOS8.0以上 ○ Android: 5.0以上

* タブレット端末ではアプリケーションをダウンロードできません。* 通信環境がない場所ではアプリケーションを起動することができません。

* QRコードが読み取れない場合は Google Play ストア、または App store 内から「インボディ」で検索してください。

株式会社インボディ・ジャパン 〒136-0071 東京都江東区亀戸 1-28-6 タニビル Tel 03-5875-5780 Fax 03-5875-5781

InBody、LookinBodyは株式会社インボディ・ジャパンの登録商標です。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。