

LookinBody 120


InBody Data Management Software



InBodyのデータがパソコンで管理できるLookinBody120

パソコン操作で InBody 測定を行い、データの閲覧・印刷ができます。

インターネットが使えない場所でも、パソコン内にサーバーを構築するため、ローカル環境で使用できます。

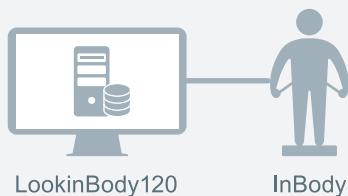


主な測定の流れ

測定前に個人情報を登録します。登録完了後、測定者はInBodyに乗ります。測定が完了すると、パソコンにデータが転送され、画面上で結果の閲覧ができます。




LookinBody120で利用できるサービス

以下のような機能をお客様のニーズに合わせて提供しています。

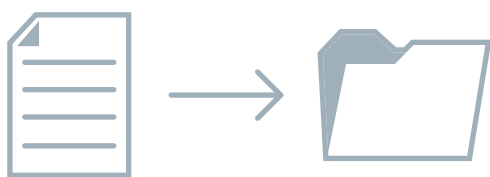

データエクスポート機能

測定結果を自動的に既定フォルダにエクスポートすることが可能です。^{*1}

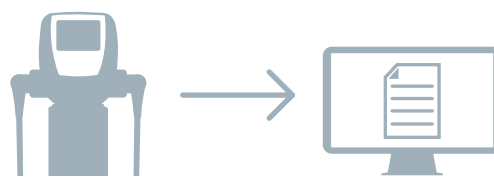

データインポート機能

InBody本体に保存したデータをUSBメモリーでコピーし、インポートすることが可能です。



複数人の連続測定

短い時間で多くの人を測定する場合、予め測定者を選択することで、個人情報の入力省けます。



豊富な接続方法

InBodyと接続する際は、有線接続だけでなく、Bluetoothや無線LANなどで繋ぐことができます。^{*2}

必要システム構成

OS: MS Windows 10/11(32bit/64bit)互換 CPU: 1.8GHz以上のプロセッサ HDD: 10GB以上の空き容量
RAM: 4GB以上 解像度: 1024×768以上 通信方法: USB、Serial(RS-232C)、LAN、Wi-Fi、Bluetooth
InBody対応機種: InBody970、InBody770、InBody BWA、InBody S10、InBody570、InBody470、InBody270

InBodyの活用度を高めてくれるデータ管理ソフトウェア

パソコンで測定結果を管理することで、様々な機能の追加や測定者の入力間違い防止に便利です。

The screenshot displays the Lookin'Body120 software interface. It features a top navigation bar with tabs for '測定者選択' (Participant Selection), '測定選択' (Measurement Selection), and '結果管理' (Result Management). The '測定者選択' tab is active, showing a search form with fields for '氏名またはIDで検索' (Search by name or ID) and '測定日で検索' (Search by measurement date), along with buttons for '検索' (Search), '全て検索' (Search all), and '新規登録' (New Registration). A table lists 165 participants with columns for selection, name, ID, height, age, gender, personal information, and measurement results. The '結果管理' tab shows options for '結果用紙印刷' (Print result sheet), 'Eメール送信' (Email), and 'データ修正' (Data correction). A sidebar on the right contains '使用案内' (Usage guide) and a visual representation of the InBody measurement process.

選択	氏名	ID	身長 (cm)	年齢	性別	個人情報	測定結果
☒	Jane Doe	SM2008	156.9	51	女性	個人情報	InBody
☐	Jennifer	JT2000	165	29	女性	個人情報	InBody
☐	マイケル・トーマス	MT1983	180	35	男性	個人情報	InBody
☐	伊東 花子	IH1965	150	55	女性	個人情報	InBody
☐	岡田 宏	OH1959	170.5	60	男性	個人情報	InBody
☐	吉田 久子	YH1951	152	68	女性	個人情報	InBody
☐	荒川 智	222233	182	32	男性	個人情報	InBody
☐	佐々木 京子	0101010	160	38	女性	個人情報	InBody
☐	佐藤 進	5674377	172.5	42	男性	個人情報	InBody
☐	山下 りえ	038464	156.2	29	女性	個人情報	InBody
☐	山田 太郎	5746	174.5	61	男性	個人情報	InBody
☐	上田 桃子	37484	161	34	女性	個人情報	InBody
☐	青木 京子	468768	155	19	女性	個人情報	InBody
☐	田中 茂	413	175	63	男性	個人情報	InBody
☐	鈴木 一郎	087687	170	54	男性	個人情報	InBody

① 個人情報の管理・登録

測定者の個人情報をID別に管理することができます。また、氏名などの詳細な個人情報も登録することができます。

② InBody測定

InBodyと有・無線で接続すると、測定したデータや設定情報が実時間で転送され、データ管理ソフトからInBody測定の指示を出すことができます。*2

③ InBody(測定結果)

InBody本体から印刷される結果用紙をそのまま画面に表示できます。体成分結果用紙に加えて項目毎に履歴の表示ができ、主な体成分の変化が分かります。

④ 結果用紙印刷

結果用紙をパソコンから印刷することができます。直近の測定結果だけではなく、履歴結果用紙の印刷も簡単にできます。*3

⑤ Eメール送信

個人情報で登録したメールアドレスに、体成分結果用紙や履歴結果用紙などを添付してメール送信することができます。

⑥ 環境設定

体成分結果用紙の項目変更・測定結果のエクセル変換・データバックアップ・旧LookinBodyデータのインポートなど、様々な機能が使用できます。*4

その他便利な機能

個人情報の(病歴 / 区分)設定 / データバックアップ・復元 / 複数名の連続測定 / 血圧値の手入力・管理 / 血糖値の手入力・管理 / 身長計(BSM370/170)の連動 / 画面ロック

*1 出力形式はCSV、JPG、PDFです。詳細につきましては、お問い合わせください。 *2 InBody S10は有線接続(USB、Serial(RS-232C))のみ対応しています。 *3 InBody S10の専用結果用紙とLookinBody120から印刷される体成分結果用紙はレイアウトが異なります。 *4 旧LookinBodyデータのインポートは、現在使用しているソフトのバージョンによってアップデートする必要があります。

個人情報の管理とセキュリティ設定

新規登録

測定者登録様式の印刷

必須情報

氏名

Jane Doe

ID

SM2008

※ IDを自動入力しますか？
* アルファベットと数字のみで入力してください。(1~14文字)

☒ 使用する ☐ 使用しない

身長

156.9

cm

性別

☐ 男性 ☒ 女性

生年月日

1969

年

7

月

24

日

* 18歳未満の場合、必ず月まで入力してください

年齢

51

追加情報

* 病歴及び区分は、「環境設定」で変更することができます。

携帯電話

080-1234-5678

病歴

☒ 糖尿病
☐ 脂質異常症
☐ 高血圧

区分

☒ 外来患者
毎月1日にInBody測定を実施
☐ 入院患者

写真検索

写真検索

☒ 登録後にInBody測定を開始する。

登録

個人情報の管理



測定に必要な必須情報の他に連絡先・病歴なども登録でき、情報のアクセスを制限することもできます。

AL1	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
38. Upper Limit (SLM Normal Range)	38. Upper	39. FFM	40. Lower	41. Upper	42. SMM	43. Lower	44. Upper	45. BMI	46. Lower	47. Upper	48. PBF	49. Lower	50. Upper	51. LBM
1	46.8	48.7	40.6	49.6	27.3	22.3	27.3	21.9	18.5	25.0	18.4	18.0	28.0	2.67
2	46.8	47.0	40.6	49.6	26.3	22.3	27.3	21.9	18.5	25.0	21.2	18.0	28.0	2.43
3	46.8	46.6	40.6	49.6	26.1	22.3	27.3	21.9	18.5	25.0	21.9	18.0	28.0	2.38
4	46.8	46.7	40.6	49.6	26.1	22.3	27.3	22.0	18.5	25.0	22.0	18.0	28.0	2.42
5	46.8	46.6	40.6	49.6	26.1	22.3	27.3	22.0	18.5	25.0	22.0	18.0	28.0	2.42
6	46.8	46.6	40.6	49.6	26.1	22.3	27.3	22.0	18.5	25.0	22.0	18.0	28.0	2.42
7	46.8	46.6	40.6	49.6	26.1	22.3	27.3	22.0	18.5	25.0	22.0	18.0	28.0	2.42
8	46.8	46.6	40.6	49.6	26.1	22.3	27.3	22.0	18.5	25.0	22.0	18.0	28.0	2.42
9	46.8	46.6	40.6	49.6	26.1	22.3	27.3	22.0	18.5	25.0	22.0	18.0	28.0	2.42
10	46.8	46.6	40.6	49.6	26.1	22.3	27.3	22.0	18.5	25.0	22.0	18.0	28.0	2.42
11	46.8	46.6	40.6	49.6	26.1	22.3	27.3	22.0	18.5	25.0	22.0	18.0	28.0	2.42
12	46.8	46.6	40.6	49.6	26.1	22.3	27.3	22.0	18.5	25.0	22.0	18.0	28.0	2.42
13	46.8	46.6	40.6	49.6	26.1	22.3	27.3	22.0	18.5	25.0	22.0	18.0	28.0	2.42
14	46.8	46.6	40.6	49.6	26.1	22.3	27.3	22.0	18.5	25.0	22.0	18.0	28.0	2.42
15	46.8	46.6	40.6	49.6	26.1	22.3	27.3	22.0	18.5	25.0	22.0	18.0	28.0	2.42
16	46.8	46.6	40.6	49.6	26.1	22.3	27.3	22.0	18.5	25.0	22.0	18.0	28.0	2.42
17	46.8	46.6	40.6	49.6	26.1	22.3	27.3	22.0	18.5	25.0	22.0	18.0	28.0	2.42
18	46.8	46.6	40.6	49.6	26.1	22.3	27.3	22.0	18.5	25.0	22.0	18.0	28.0	2.42
19	46.8	46.6	40.6	49.6	26.1	22.3	27.3	22.0	18.5	25.0	22.0	18.0	28.0	2.42
20	46.8	46.6	40.6	49.6	26.1	22.3	27.3	22.0	18.5	25.0	22.0	18.0	28.0	2.42
21	46.8	46.6	40.6	49.6	26.1	22.3	27.3	22.0	18.5	25.0	22.0	18.0	28.0	2.42
22	46.8	46.6	40.6	49.6	26.1	22.3	27.3	22.0	18.5	25.0	22.0	18.0	28.0	2.42
23	46.8	46.6	40.6	49.6	26.1	22.3	27.3	22.0	18.5	25.0	22.0	18.0	28.0	2.42
24	46.8	46.6	40.6	49.6	26.1	22.3	27.3	22.0	18.5	25.0	22.0	18.0	28.0	2.42

測定結果のエクセル変換

エクスポートしたエクセルファイルは、個人情報で登録した情報が全て追加されるので、集計や分析に便利です。

体成分の変化を確認する測定結果用紙

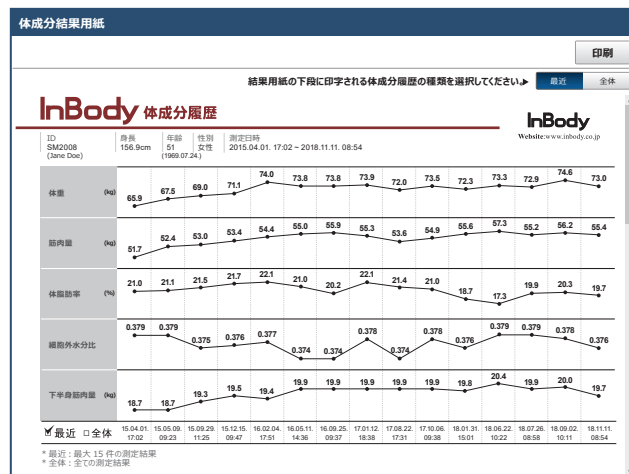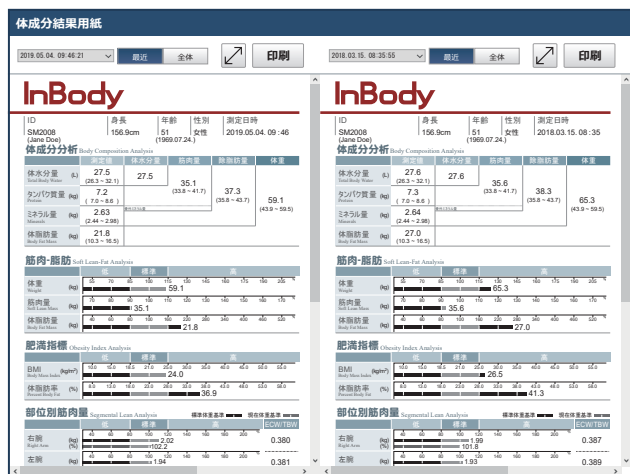

体成分結果用紙の比較

測定年月日を選択して過去に測定した結果を閲覧したり、比較をすることができます。

履歴結果用紙の印刷

必要な項目のみを選択して印刷することができます。最大15件の測定結果が折れ線グラフで確認できます。

外国製造業者 (InBody Co., Ltd. Factory) が取得している認証



InBody 株式会社インボディ・ジャパン www.inbody.co.jp

東京本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 1-28-6 タニビル
Tel 03-5875-5780 Fax 03-5875-5781
大阪営業所 Tel 06-6155-6937 Fax 06-6155-6938
仙台営業所 Tel 022-302-6301 Fax 022-302-6302
名古屋営業所 Tel 052-684-9616 Fax 052-684-9617
広島営業所 Tel 082-236-7630 Fax 082-236-7631
松山営業所 Tel 089-948-9073 Fax 089-948-9074
福岡営業所 Tel 092-292-1766 Fax 092-292-1776

InBody、LookinBodyは株式会社インボディ・ジャパンの登録商標です。