



アプリでInBody結果が管理できます。

InBody結果画面の右上にあるQRコードボタンを選択し、表示されたQRコードを専用アプリで読み取る必要があります。
 ※ 結果用紙に印字されたQRコードから読み取ることも可能です。※ 結果用紙にQRコードを印字するには、管理者による結果項目の設定変更が必要です。

まずはInBodyアプリをダウンロードしてください。



InBody(無料)

App Store、またはGoogle Play
 ストアからアプリケーションをダウンロードできます。



アプリのダウンロード
 【iOS版】



アプリのダウンロード
 【Android版】



< 互換性 > ○ iPhone: iOS13.0以上 ○ Android: 7.0以上

* タブレット端末ではアプリケーションをダウンロードできません。* 通信環境がない場所ではアプリケーションを起動することができません。

* QRコードが読み取れない場合は Google Playストア、または App store内から「インボディ」で検索してください。


ダウンロード完了後にInBodyアプリを起動して、 新規登録を行ってください。



- 1 InBodyアプリを起動し、携帯番号を入力してください。



- 2 メールアドレスを入力し、メール認証を行います。*キャリアメールは受信できない場合があります。

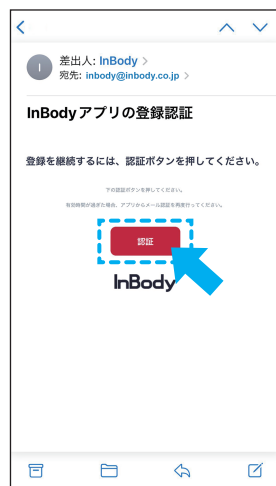

- 3 受信メールを開いて、認証を選択し、InBodyアプリに戻ります。



- 4 個人情報の登録後に製品設定画面が表示されます。一番下の「なし」を選択してください。



- 5 ダッシュボードの「InBody測定記録」から「QR読み込み」を選択してください。



- 6 読み取り画面からInBodyに表示されているQRコードをスキャンすると、データが転送されます。