


LookinBody Web


Cloud Database Management

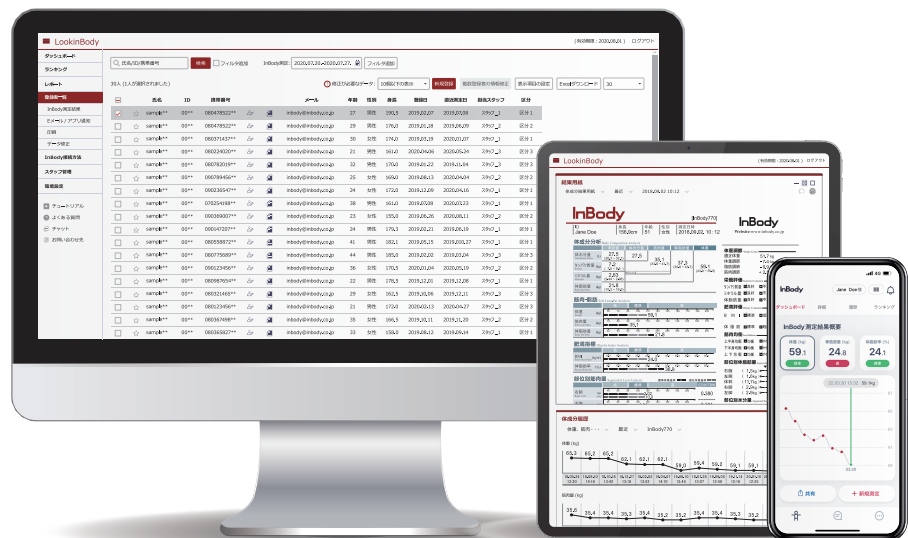

いつでも、どんな場所でも測定結果を確認できる LookinBody Web

InBodyで測定した全てのデータを、ネットワーク経由で提供するクラウドサービスです。

主な運用の流れ

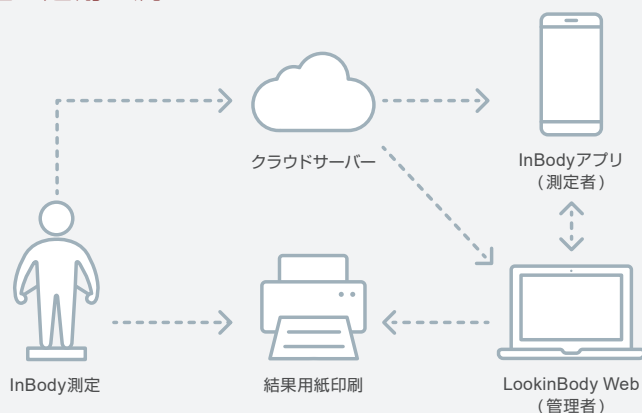

いつでも測定結果を確認

測定結果や個人情報をクラウドサーバーに一括管理することで、時間や場所に関係なく、管理・閲覧することができます。

結果用紙のペーパーレス化

アプリから測定結果を提供することで、結果用紙を印刷する必要がないペーパーレスの運用が可能です。

LookinBody Webで利用できるサービス

以下のような機能をお客様のニーズに合わせて提供しています。



多様な端末から接続可能

インターネットに接続し、パソコンやタブレット、スマートフォンで測定結果の管理ができます。*1

スマートフォンで自身の結果を確認

測定者はアプリをインストールすることで、InBodyで測定した結果を閲覧することができます。*2 *3



測定結果の集計・分析

期間を定めて測定者の体成分改善の傾向や、測定頻度など様々な統計データを確認できます。

複数施設データの一元管理

傘下の施設で使用しているInBodyの測定データを一括で管理することができます。*4

その他便利な機能

履歴結果用紙の印刷 / エクセルデータ変換 / 画面ロック / 個人情報のマスキング / 登録者の測定制限 / 読み取り専用モード / 本体保存データのアップロード / LookinBody120データのアップロード*5 / ユーザーログの確認 / API 経由データアクセス*6

目的に応じたデータをいつでも活用できる状態で管理

蓄積したデータを可視化するだけでなく、データの修正や保護にも最適です。

LookinBody

(有効期限: 2020.08.01) ログアウト

ダッシュボード

ランキング

レポート

登録者一覧

InBody測定結果

メール / アプリ通知

印刷

データ修正

InBody接続方法

スタッフ管理

環境設定

チュートリアル

よくある質問

チャット

お問い合わせ先

氏名/ID/携帯番号

検索

フィルタ追加

InBody測定: 2020.07.20.-2020.07.27. 始

フィルタ追加

30人(1人が選択されました)

新規登録エクセルアップロード

退会者エクセルアップロード

修正が必要なデータ: 10個以下の表示

1 新規登録

複数登録者の情報修正

表示項目の設定

測定結果の

3 Excelダウンロード

30

	氏名	ID	携帯番号	メール	年齢	性別	身長	登録日	直近測定日	担当スタッフ	区分
☒	☆ sample**	00**	080478522**	inbody@inbody.co.jp	27	男性	190.5	2019.02.07	2019.07.08	スタッフ_1	区分1
☐	☆ sample**	00**	080478522**	inbody@inbody.co.jp	29	男性	176.0	2019.01.18	2019.06.09	スタッフ_2	区分2
☐	☆ sample**	00**	080371437**	inbody@inbody.co.jp	30	女性	174.0	2019.03.19	2020.01.07	スタッフ_1	区分1
☐	☆ sample**	00**	080224020**	inbody@inbody.co.jp	21	男性	161.0	2020.04.06	2020.05.24	スタッフ_3	区分3
☐	☆ sample**	00**	080782019**	inbody@inbody.co.jp	32	男性	170.0	2019.01.22	2019.11.04	スタッフ_3	区分3
☐	☆ sample**	00**	090789456**	inbody@inbody.co.jp	25	女性	169.0	2019.08.13	2020.04.04	スタッフ_2	区分2
☐	☆ sample**	00**	090236547**	inbody@inbody.co.jp	24	女性	172.0	2019.12.09	2020.04.16	スタッフ_1	区分1
☐	☆ sample**	00**	070254198**	inbody@inbody.co.jp	38	男性	161.0	2019.07.08	2020.07.23	スタッフ_1	区分1
☐	☆ sample**	00**	090369007**	inbody@inbody.co.jp	23	女性	155.0	2019.06.26	2020.08.11	スタッフ_2	区分2
☐	☆ sample**	00**	090147207**	inbody@inbody.co.jp	24	男性	179.3	2019.02.21	2019.06.19	スタッフ_1	区分1
☐	☆ sample**	00**	080558872**	inbody@inbody.co.jp	41	男性	182.1	2019.05.15	2019.01.027	スタッフ_1	区分1
☐	☆ sample**	00**	080775689**	inbody@inbody.co.jp	44	男性	185.0	2019.02.02	2019.03.04	スタッフ_3	区分3
☐	☆ sample**	00**	090123456**	inbody@inbody.co.jp	36	女性	170.5	2020.01.04	2020.05.19	スタッフ_2	区分2
☐	☆ sample**	00**	080987654**	inbody@inbody.co.jp	22	男性	178.5	2019.12.01	2019.12.08	スタッフ_1	区分1

1 個人情報の管理・登録

測定者の個人情報をID別に管理することができます。また、氏名などの詳細な個人情報も登録することができます

選択	氏名	ID	測定日時
☐	sample_01	101	2024.01.20 20:00:20
☒	sample_02	102	2024.02.20 20:00:20
☒		103	2024.03.20 21:00:20



選択	氏名	ID	測定日時
☐	sample_01	101	2024.01.20 20:00:20
☐	sample_01	101	2024.02.20 20:00:20
☐	sample_01	101	2024.03.20 21:00:20

Excelダウンロード

期間

2024.03.11.-2024.03.18.

データ項目

- ☒ Weight
- ☒ TBW(Total Body Water)
- ☒ Protein
- ☒ Minerals
- ☒ BFM(Body Fat Mass)
- ☒ SLM(Soft Lean Mass)
- ☒ FFM(Fat Free Mass)
- ☒ SMM(Skeletal Muscle Mass)
- ☒ BMI(Body Mass Index)

2 データ修正

測定時に間違えて入力したIDを修正することができます。既存のIDにも併合できます。

3 Excel ダウンロード

期間を指定して登録者の情報や測定項目を抽出できるので、データの分析に適しています。

*1 スマートフォンで LookinBody Web に接続する場合、使用する端末やインターネットブラウザによっては、正常に表示されなかったり、使用できないことがあります。インターネットブラウザは、Google Chrome(Ver.72.0 以後) を推奨します。*2 測定者がアプリで自身の測定結果を確認するには、InBody測定時に携帯番号を入力する必要があります。*3 管理者はウェブサイト (<https://jpn.lookinbody.com>) より測定結果を確認するので、アプリをダウンロードする必要はありません。測定者がご自身のスマートフォンで測定結果を閲覧する場合に限り、各自で専用アプリをダウンロードする必要があります。*4 複数施設で測定されたデータを本部として一括管理するには、オプションのフランチャイズ管理者用アカウントが必要です。*5 LookinBody120データをクラウドにアップロードするには、現在使用しているLookinBodyソフトのバージョンによっては、先にアップデートが必要になる場合があります。*6 基本プランを契約されている方はAPI経由でもクラウドのデータにアクセスできます。但し、当サービスを利用するには別途の手続きが必要ですので、(株)インボディ・ジャパンまでお問合せください。


測定結果の活用をサポートする豊富な機能

測定結果をID毎に管理することができます。また、測定結果の項目を分かりやすく解説した資料を提供します。



結果用紙(比較)

測定日が異なる2つの結果を横並びか縦並びで比較することができます。測定者の体成分が前後でどのように変化したか、より効果的に説明できます。

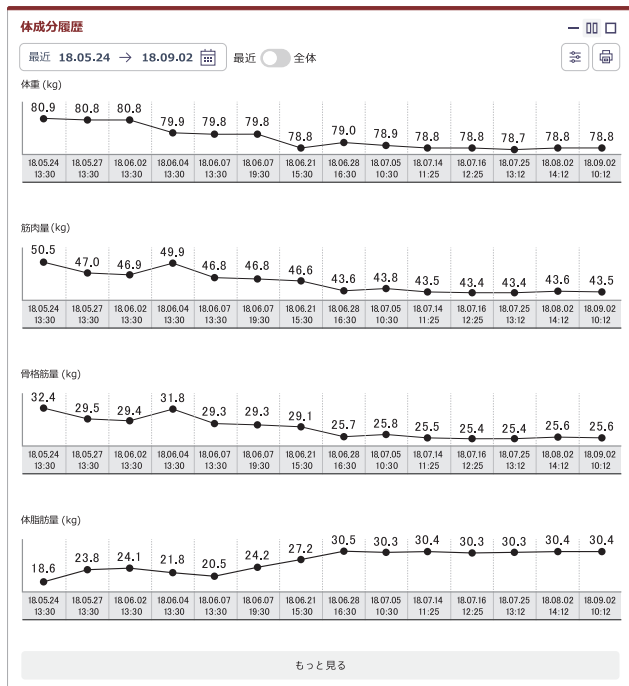

体成分履歴

各項目の測定結果を直近14件まで折れ線グラフで表示することができます。





InBody測定の説明資料

体成分測定的重要性・測定原理・測定項目の見方・測定時の注意事項などに関する説明資料が閲覧できます。


集計した測定結果の視覚化が可能

施設内の測定者数や測定件数をグラフで表示したり、項目毎にランキング形式で分析することがができます。

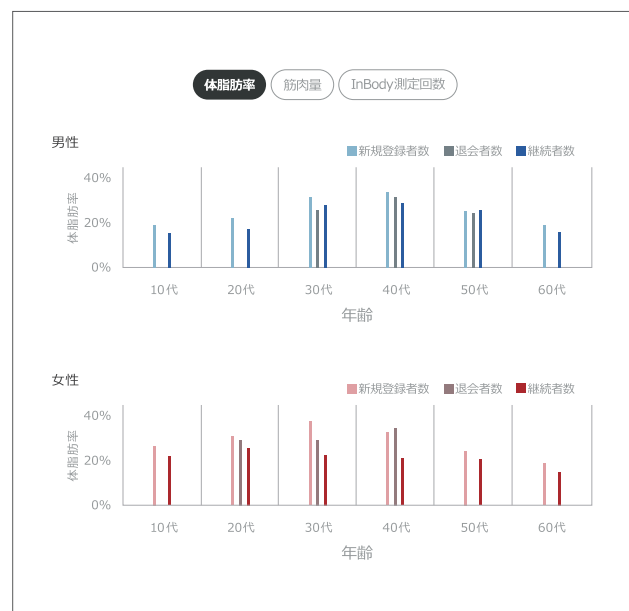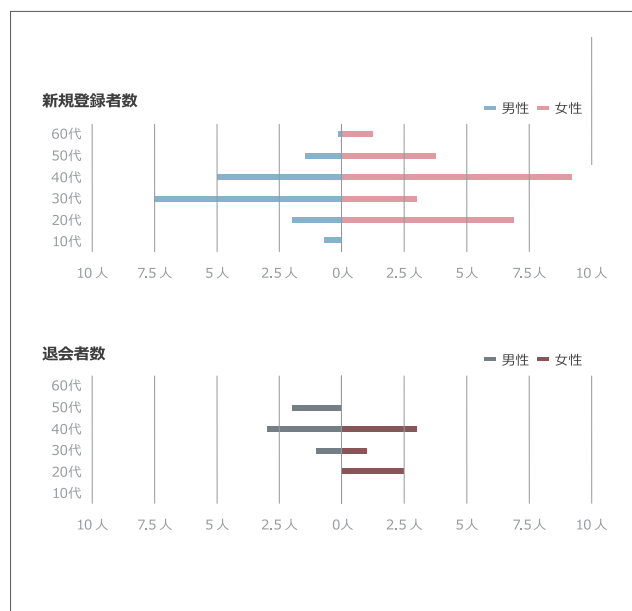

利用状況の視覚化

新規登録者数と退会者数を年代・性別毎に分けて集計することができます。

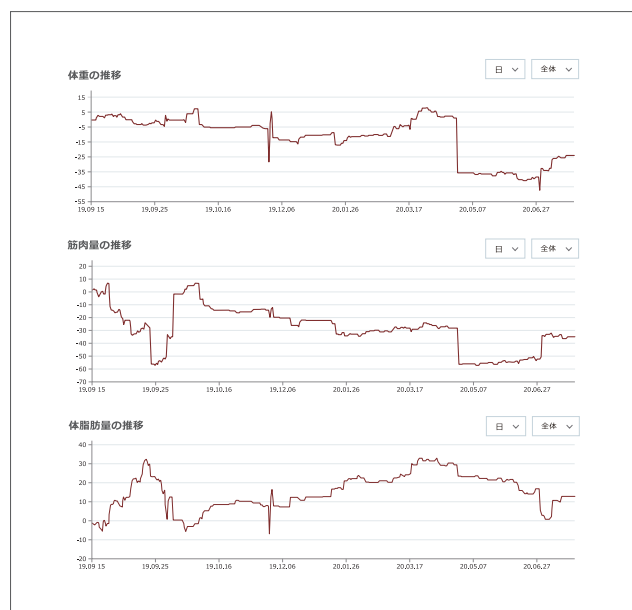


主要項目の推移を閲覧

体成分・測定件数の推移を折れ線グラフで集計することができます。

年代別測定データを比較

体脂肪率・筋肉量・InBody測定回数の推移を年代・性別毎に分けて集計することができます。

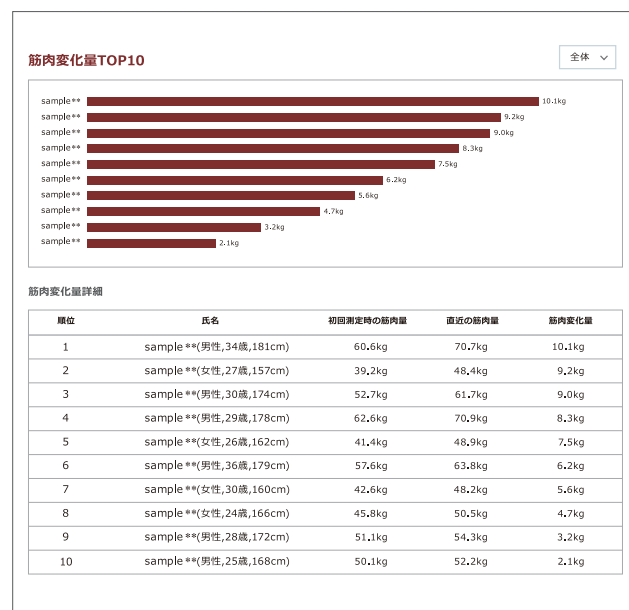

ランキング形式で確認


主要項目の変化量を全体・性別毎に分けてランキング形式で確認することができます。

測定結果のアドバイスをよりの確に

測定者は専用のアプリをダウンロードすることで、スマートフォンで自身の測定結果や設定目標を確認できます。また、測定者とメールやチャットのやり取りもできるので、お互いに必要な情報をいつでも共有できます。



*表示画面はディスプレイの解像度によって異なります。

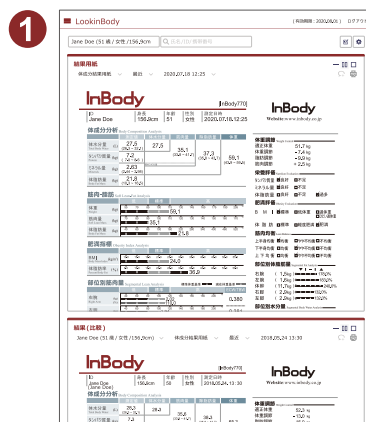

管理者画面
(インターネットブラウザ経由)




測定者画面
(InBodyアプリ経由)

チャット形式でデータを共有

チャットルームを開設することで測定者とやり取りができます。

* 測定者は InBody アプリをダウンロードする必要があります。

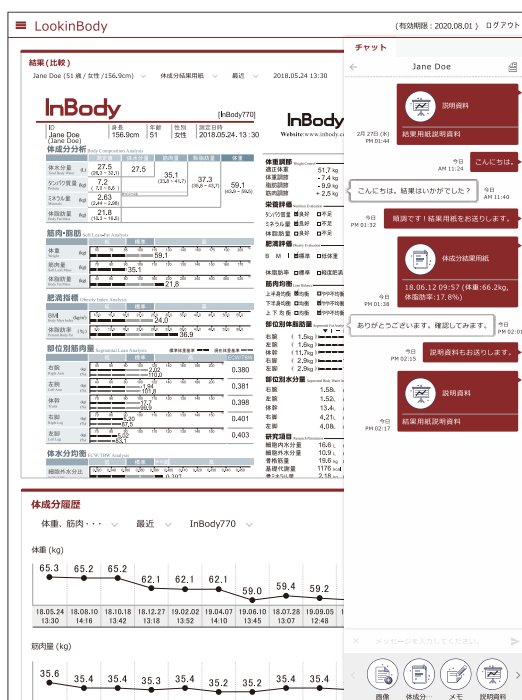

管理者画面



測定者画面

InBodyアプリのダウンロード



InBody(無料)

Google Playストア、またはApp Storeでアプリケーションをダウンロードできます。



< 対応OS >

○ iPhone: iOS 13.0以上

○ Android: 7.0以上

※タブレット端末ではアプリケーションをダウンロードできません。

* 通信環境がない場所ではアプリケーションを起動することができません。

基本料金^{※1}

基本プラン	契約料金	3,000円 (税込 3,300円) / 月
	利用可能 InBody 台数	1 台
	利用可能アカウント数	管理者アカウント 1、スタッフアカウント 2
オプション	接続 InBody の追加	1 台 3,000円 (税込 3,300円) / 月
	スタッフアカウントの追加	1 アカウント 6,000円 (税込 6,600円) / 月
	フランチャイズ管理者用アカウントの利用 ^{※2}	5,000円 (税込 5,500円) / 月

※1 月単位で表示している料金は基本 1 年単位で購入することができます。詳しくは下の「有料正式版のご購入方法」をご参照ください。

※2 フランチャイズ管理者用アカウントは、傘下支店別の測定状況・測定データが全て閲覧できます。

無料体験版のご利用方法 (基本 30 日間)

【基本プランの全てを使用可能にする登録手順】

1. パソコンから <https://jpn.lookinbody.com> に接続し、管理者ログインで新規登録します。※3
2. ログイン画面の左下にある【ユーザーマニュアル】をダウンロードします。
3. 登録した ID でログインすると、【チュートリアル】が表示されます。
4. チュートリアルの案内に従って InBody の設定を完了し、測定を行います。※4
5. LookinBody Web の画面やスマートフォンの InBody アプリから結果が表示されることを確認します。※5

※3 インターネットブラウザは、Google Chrome (Ver.72.0 以後) を推奨します。

※4 クラウドサーバーにデータを送るには、測定時に画面上で「個人情報の取り扱いについて」に同意し、ID を入力する必要があります。

※5 スマートフォンで測定結果を確認するには、測定時に画面上で携帯番号を入力し、同じ番号で InBody アプリに新規登録する必要があります。

【無料体験版ご利用前の確認事項】

1. 対応機種：InBody970・BWA・770・580・380・380N・270 ※6
2. 使用環境：InBody を有線 LAN か Wi-Fi に接続できる環境 ※7

※6 対応機種でも 2019 年 7 月以前に導入された機器はアップデートが必要です。近くの営業所にお問い合わせください。

※7 安定的な通信状態を維持するには有線 LAN をお勧めします。Wi-Fi は契約プランの仕様によって繋がらない場合があります。



LookinBody Web
接続ページ

有料正式版のご購入方法 (有料転換)

【お支払い方法】

1. 無料体験期間中、画面にはアカウントの有効期限が表示され、この期限を過ぎるとアクセスができません。
2. アクセス権は使用環境に応じるライセンス料を支払うことで再度与えられ、支払い方法には 2 種類があります。
 - 見積兼注文書の発行を依頼し、現金振り込みでライセンスを購入する。※9 ※10
 - インボディ楽天市場店 (<https://www.rakuten.co.jp/inbody>) でライセンスを購入する。
3. 購入したライセンスがアカウントに反映されるには、最長 1 営業日が所要します。

※8 現金振り込みの場合、1 年単位のみ購入が可能です。インボディ楽天市場店は、6・12 ヶ月単位で購入することができます。

※9 途中の契約解除を希望する場合、月割りの計算で払戻しとなり、1 ヶ月に満たない日数は 1 ヶ月に繰り上がります。また、解約事務手数料として 3,000円 (税抜) を払戻し金額から差し引かせていただきます。

InBody

外国製造業者(InBody Co., Ltd. Factory)が取得している認証



NAWI



1 6 3 9

ヨーロッパCE



ISO9001



ISO13485



MDSAP

InBody 株式会社インボディ・ジャパン www.inbody.co.jp

東京本社	〒136-0071 東京都江東区亀戸 1-28-6 タニビル
	Tel 03-5875-5780 Fax 03-5875-5781
大阪営業所	Tel 06-6155-6937 Fax 06-6155-6938
札幌営業所	Tel 011-776-7571 Fax 011-776-7572
仙台営業所	Tel 022-302-6301 Fax 022-302-6302
名古屋営業所	Tel 052-684-9616 Fax 052-684-9617
広島営業所	Tel 082-236-7630 Fax 082-236-7631
松山営業所	Tel 089-948-9073 Fax 089-948-9074
福岡営業所	Tel 092-292-1766 Fax 092-292-1776

InBody、LookinBodyは株式会社インボディ・ジャパンの登録商標です。



ご購入後のサポート体制に関する情報はこちら