



# アプリでInBody結果が管理できます。

InBody 結果画面から提供される二次元コードを専用アプリで読み取る必要があります。

※ 結果用紙に印字された二次元コードから読み取ることも可能です。※ 結果用紙に二次元コードを印字するには、管理者による結果項目の設定変更が必要です。

## まずはInBodyアプリをダウンロードしてください。



**InBody(無料)**

App Store、または Google Play  
ストアからアプリケーションをダウンロードできます。



アプリのダウンロード  
【iOS版】



アプリのダウンロード  
【Android版】

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


< 互換性 > ○ iPhone: iOS13.0以上 ○ Android: 7.0以上


\* タブレット端末ではアプリケーションをダウンロードできません。\* 通信環境がない場所ではアプリケーションを起動することができません。

\* 二次元コードが読み取れない場合は Google Play ストア、または App store 内から「インボディ」で検索してください。


# ダウンロード完了後にInBodyアプリを起動して、 新規登録を行ってください。




① InBodyアプリを起動し、携帯番号を入力してください。

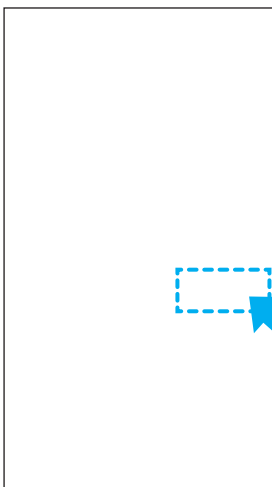


② メールアドレスを入力し、メール認証を行います。\*キャリアメールは受信できない場合があります。

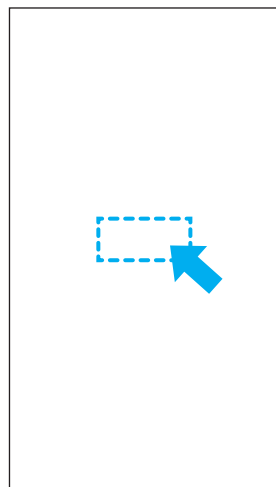


③ 受信メールを開いて、認証を選択し、InBodyアプリに戻ります。

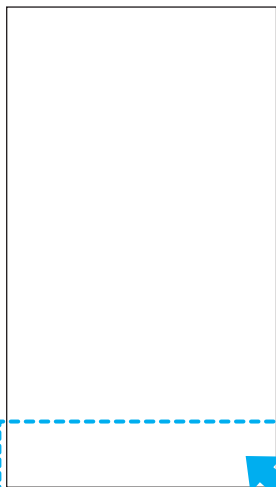

④ 個人情報の登録後に製品設定画面が表示されます。一番下の「なし」を選択してください。

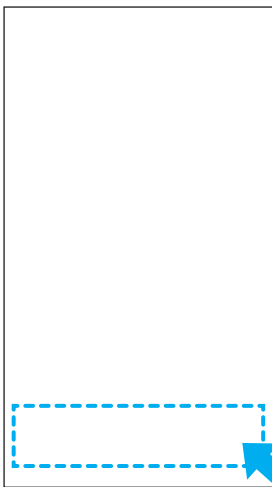

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⑤ ダッシュボードの「InBody測定記録」から「QR読み込み」を選択してください。



⑥ 読み取り画面からInBodyに表示された二次元コードをスキャンすると、データが転送されます。