



アプリでInBody結果が管理できます。

InBody結果画面から提供される二次元コードを専用アプリで読み取る必要があります。

- ※ 結果用紙に印字された二次元コードから読み取ることも可能です。
- ※ 結果用紙に二次元コードを印字するには、管理者による結果項目の設定変更が必要です。

まずはInBodyアプリをダウンロードしてください。



InBody(無料)

App Store、またはGoogle Play
ストアからアプリケーションをダウンロードできます。



アプリのダウンロード
【iOS版】



アプリのダウンロード
【Android版】



< 互換性 > ○ iPhone: iOS13.0以上 ○ Android: 7.0以上

- * タブレット端末ではアプリケーションをダウンロードできません。* 通信環境がない場所ではアプリケーションを起動することができません。
- * 二次元コードが読み取れない場合はGoogle Playストア、またはApp store内から「インボディ」で検索してください。


アプリを起動して新規登録を行ってください。



インストールしたアプリを起動し、「新規登録」を選択します。



携帯番号とメールアドレスを入力し、メール認証を行います。

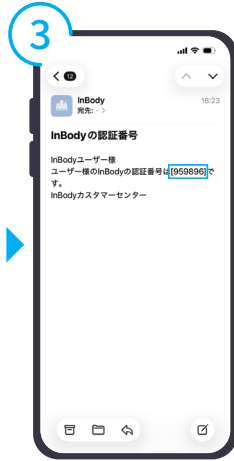

受信フォルダを開いて認証メールを確認し、届いた認証番号をアプリに入力します。*




パスワード・生年月日・性別・身長の順に個人情報を登録します。



個人情報の取り扱いに同意すると、最初の画面に戻ります。登録した携帯番号とパスワードを入力してログインします。



ログイン後に製品設定画面が表示されたら、その他の「なし」を選択します。登録は以上になります。

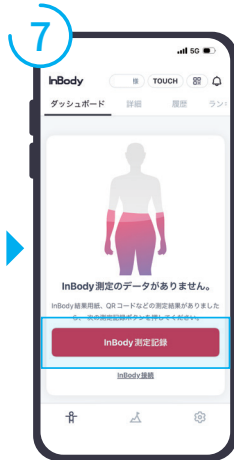

ダッシュボード内の「InBody測定記録」から「QR読み込み」を選択します。



InBodyに表示された二次元コードをスキャンすると、測定データが送信されます。

*キャリアメールは受信されない場合があるので、別のメールアドレスをお試しください。

InBodyアプリについてご不明な点がございましたら、株式会社インボディ・ジャパン カスタマーセンター（フリーアクセス 0120-900-369）までお問い合わせください。【受付時間：平日9:00～18:00】